



Vanne Maymom

Convient pour Ameda[®] Purely Yours,
Tire-lait Mya Joy et bride Maymom Lazy Flange

Instructions



Avant la première utilisation :

Nettoyez la valve dans de l'eau
bouillante ou de la vapeur pendant 3 à 5 minutes.

Après chaque utilisation :

- Détachez, lavez délicatement à la main avec de l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez à l'air libre dès que possible pour éviter la formation de moisissures.
- PAS de nettoyage au lave-vaisselle

Démontage :

- Lors du retrait de la valve de la bride, NE JAMAIS la saisir par son ouverture fine.
- Maintenez la valve le plus près possible de sa base.

De cette façon, vous n'endommagerez pas la zone fragile de la valve.

Nettoyage:

N'insérez jamais d'objet dans l'ouverture de la valve pour la nettoyer. Cela pourrait déchirer ou étirer la pièce, ce qui entraînerait une mauvaise performance.





Dépannage

- Lorsqu'il n'y a pas d'aspiration, vérifiez que l'embout de la valve n'est pas endommagé ou déchiré et qu'il n'y a pas de débris ou de particules étrangères entre les deux lèvres. Même un petit cheveu peut entraîner une perte de puissance d'aspiration.
- Il est toutefois acceptable de voir une petite ouverture à l'extrémité lorsque la valve n'est pas utilisée.

Caractéristiques

Ce produit est conforme aux normes de la FDA pour le plastique en contact avec les aliments.

Les rapports sont disponibles en ligne.

Matériau : Silicone

Modèle : A005 / B005

Durée de conservation : 10 ans

Date du fabricant : 26 juin 2024

Fabriqué à Taiwan

Service client

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



+1 919 4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts.
Not for children under 3yrs.



WARNING:
POTENTIAL HAZARD

This is not a toy,
keep it away from children.